




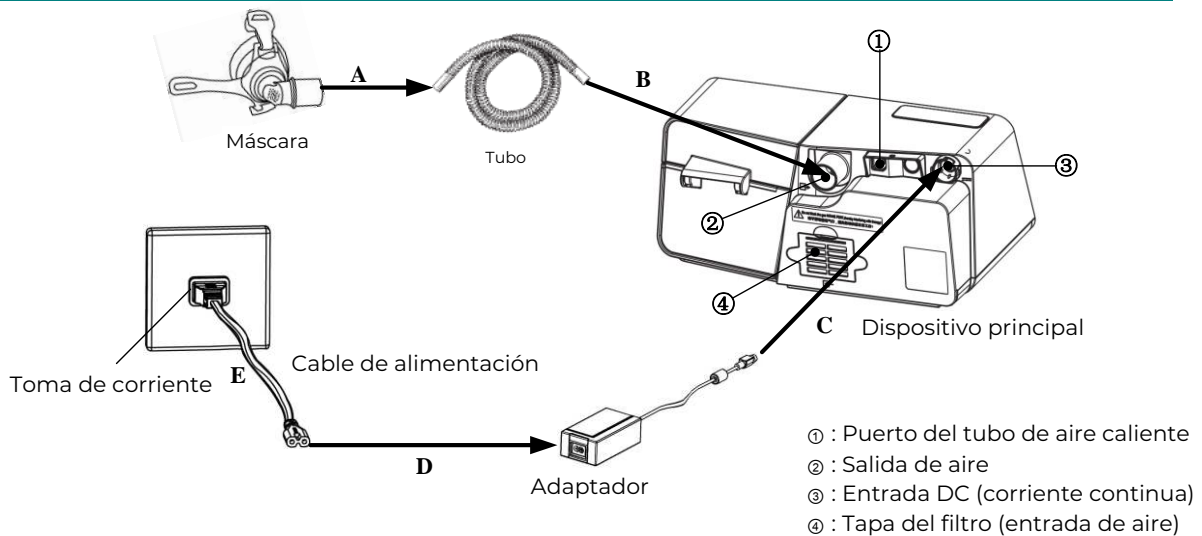


Luna® G3 APAP (LG3600) / Luna® G3 CPAP (LG3500) Guía de configuración rápida para el paciente

1. Funciones de las teclas



-  Botón de inicio: volver al menú anterior o a la interfaz principal.
-  Perilla: ajustar la configuración del dispositivo.
-  Botón de iniciar / finalizar: iniciar o detener el suministro de aire.

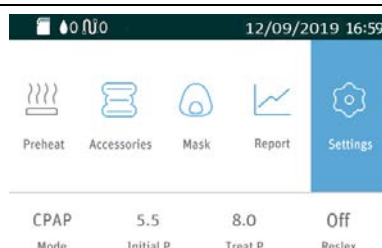
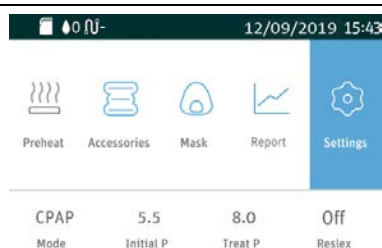
2. Configuración del dispositivo





- A. Conecte la máscara previamente montada a un extremo del tubo.
- B. Conecte el otro extremo del tubo a la salida de aire del dispositivo, como se muestra en la imagen de arriba. O conecte la unión del tubo de aire caliente a la salida de aire del dispositivo y luego inserte el enchufe del tubo en el puerto del tubo de aire caliente situado en la parte posterior del aparato.
- C. Conecte el adaptador de corriente a la entrada DC del dispositivo principal.
- D. Conecte el cable de alimentación al adaptador de corriente.
- E. Enchufe el cable de alimentación a la toma de corriente.

3. Ajuste de la configuración del dispositivo

A. Al encender el aparato, la pantalla mostrará la interfaz principal, tal como aparece en la imagen inferior izquierda. Si el tubo de aire caliente está conectado correctamente, el icono  se convertirá en un número  en la interfaz principal de la pantalla, como se muestra en la figura inferior derecha.



B. Sitúe el cursor sobre el icono  y presione **la perilla**  para acceder a la interfaz de configuración inicial del menú del paciente, como se muestra en la imagen de abajo. La opción de tubo de aire caliente solo puede configurarse cuando el dispositivo está conectado a dicho tubo, como se muestra en la imagen inferior derecha.



C. Pulse **la perilla**  para seleccionar la opción que desea ajustar, tal como se muestra en la imagen de abajo.





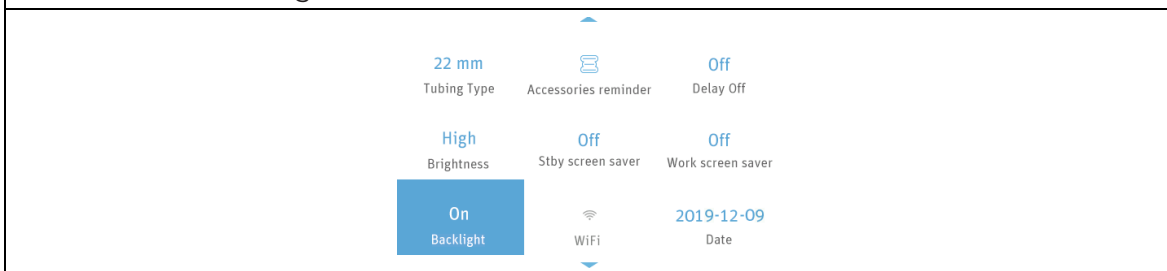
D. Gire **la perilla**  para configurar la opción seleccionada.




E. Pulse **la perilla**  de nuevo para confirmar el ajuste realizado.



F. Al girar **la perilla**  se accede a las diferentes opciones, como muestra la imagen. Consulte los pasos C-E para realizar otros ajustes. Pulse **la tecla de inicio**  para salir de la interfaz de configuración.



4. Inicio del tratamiento

Cuando haya terminado de ajustar la configuración del dispositivo, presione **el botón de iniciar / finalizar**  desde la interfaz principal para comenzar el tratamiento.

5. Puntuación de uso de Luna® G3 APAP (LG3600) / Luna® G3 CPAP (LG3500)

Trás cada tratamiento, Luna® G3 APAP (LG3600) / Luna® G3 CPAP (LG3500) muestra en la pantalla una puntuación (solo para los modos CPAP y AutoCPAP) y un resumen de uso para que el usuario reciba una idea global de su uso durante el último día (desde las 12:00 pm del día anterior hasta las 12:00 pm del día en curso).

La puntuación total es de 100 puntos, con el siguiente desglose:

<input type="checkbox"/> Puntuación total	Estado	Visualización
≥ 75	Bueno	
55 - 74	Aceptable	
≤ 54	Necesita mejorar	

Tiempo de uso (60 puntos)

Cuanto más tiempo de tratamiento haya recibido el usuario, más puntos obtendrá. Si el dispositivo se usa durante 30 minutos, se consiguen 5 puntos; si se usa durante 1 hora, se obtienen 10 puntos. El usuario puede conseguir un máximo de 60 puntos en total.

Tiempo de uso (min)	≥360	330-359	300-329	...	60-89	30-59	0-29
Puntuación	60	55	50	...	10	5	0

Ajuste de la máscara (20 puntos)

Si el usuario sella bien la mascarilla para evitar fugas durante el tratamiento, podrá obtener hasta 20 puntos. Si la fuga media es inferior a 10 L/min, el usuario anotará 20 puntos, mientras que por cada aumento de 5 L/min en el nivel de fuga, se deducirán 5 puntos.

Fuga (L/min)	<10	10-14	15-19	20-24	≥25
Puntuación	20	15	10	5	0

Alteraciones respiratorias (10 puntos)

Cuanto menor sea el número de alteraciones respiratorias (apneas e hipopneas), mayor será la puntuación. Si el IAH es inferior a 5, el usuario conseguirá 10 puntos, mientras que si es ≥ 5, se descontarán 2 puntos por cada 5 puntos de aumento del IAH.

IAH	<5	5-9	10-14	15-19	20-24	≥25
Puntuación	10	8	6	4	2	0